

In Fröhlichkeit  
den Menschen dienen



Allgemein öffentliches Krankenhaus  
**Elisabethinen Linz**

Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik (IMCL)

# Präanalytik Punktat

Für die Bestimmung der Zellzahl bzw. zur Anfertigung eines Ausstrichpräparats bitte das Punktionsmaterial in ein Blutbildröhrchen (lila) überführen (zur Vermeidung einer Gerinnungsbildung).

Für die chemischen Parameter (Gesamteiweiß, Amylase, LDH, etc.) Nativmaterial in der Spritze schicken oder Material in ein grünes Röhrchen überführen.

Für Kristalle: Punktionsmaterial ohne Zusatz, z.B. Gelenkpunktat in Spritze.  
Üblicherweise sind insgesamt 10 - 20 ml Untersuchungsmaterial ausreichend.